


NSK Perio-Mate Podręczna Instrukcja Użytkowania



Przed użyciem




Przed użyciem piaskarki należy dokładnie osuszyć złącze sprzęgające, końcówkę roboczą, złączkę węża, wewnętrzną część pojemnika z proszkiem i wewnętrzną część pokrywy pojemnika na proszek.

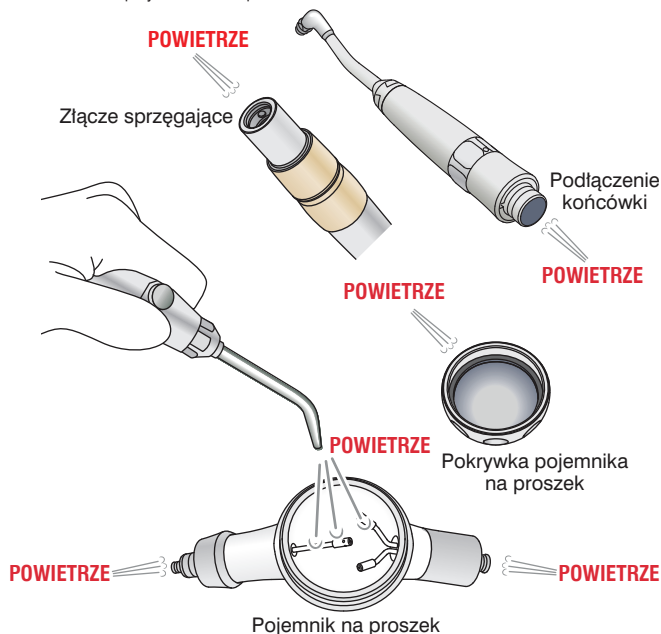


Zakładanie i zdejmowanie końcówki dyszy

Zakładanie końcówki dyszy (Patrz Instrukcja Użytkowania 6-6)
Pewnie (dokładnie) załóż końcówkę dyszy na wylot końcówki, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Po założeniu uchwycij końcówkę i delikatnie ją pociągnij aby upewnić się, że założona jest poprawnie.

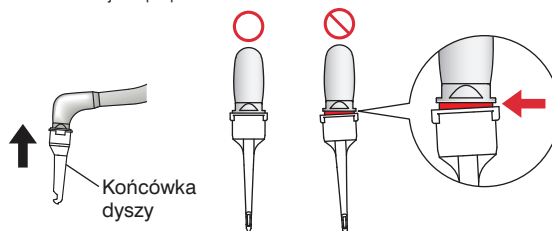

Zdejmowanie końcówki dyszy (Patrz Instrukcja Użytkowania 6-6)
Po zabiegu, zdejmij końcówkę dyszy z wylotu końcówki używając do tego celu specjalnego klucza.

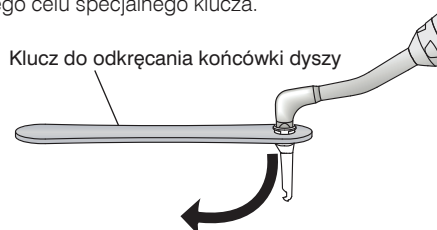


Wyrzucanie i usuwanie usterek

Zablokowanie przez proszek

Patrz: Instrukcja Użytkowania 8.10


Rozłącz dyszę z końcówką i stosując dołączony sposób wyczyść otwory wylotowe dyszy i końcówki roboczej. W analogiczny sposób wyczyść otwory dysz w pojemniku na proszek.

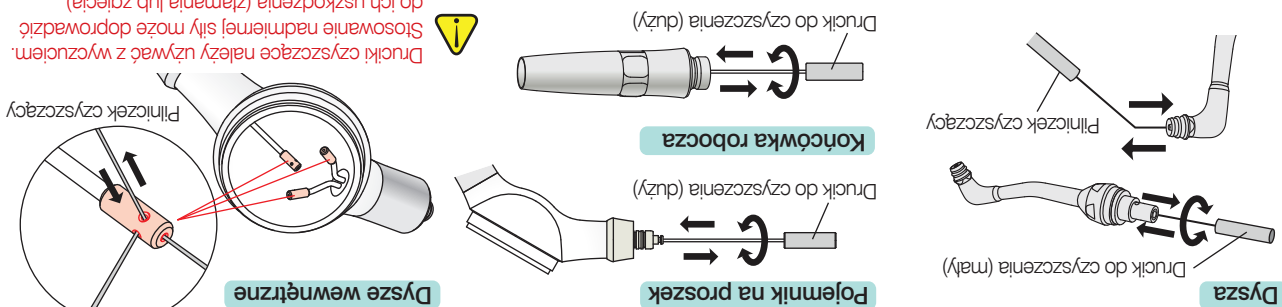

Po dokładnym usunięciu zestalonego proszku, wykonaj czyszczenie ultradźwiękowe i sterylizację w autoklawie.

Przeciek wody

Patrz: Instrukcja Użytkowania 7.3 - 7.4

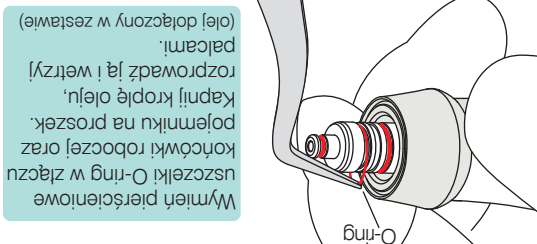

Uwaga!

- Aby zapobiec blokowaniu i zatkaniu się dysz urządzenia Perio Mate przynajmniej raz w tygodniu poddawaj je czyszczeniu ultradźwiękowemu (prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Użytkowania – 8.1).
- W Instrukcji Podręcznej opisane są podstawowe metody konserwacji i czyszczenia urządzenia. W celu uzyskania dokładniejszych informacji i prosty zapoznać się z pełną Instrukcją Użytkowania.
- Instrukcję Podręczną jak i Instrukcję Użytkowania przechowuj w miejscu łatwo dostępnym.

Czynności jakie należy wykonać po użyciu piaskarki



OSTRZEŻENIE


- Wymaga się, aby piaskarka Ferto Mate po każdym użyciu była czyszczona i poddawana regularnej konserwacji.
- (Zanieczyszczenie tego obwodu może prowadzić do blokowania urządzenia przez proszek, przecieki wody, itp.).
- Jeżeli w pojemniku na proszek pozostaną resztki proszku, może dojść do zestalenia się proszku, co powoduje zatkanie piaskarki).
- Przed użyciem należy dokładnie osuszyć złącze, końcówkę, złącze węża, wewnętrzną część pojemnika z proszkiem i dyszę.
- Należy także pracować z piaskarką na biegu jałowym przepuszczając przez nią tylko sprężone powietrze w celu wydmuchania wody znajdującej się w wewnętrznych elementach.
- Przynajmniej raz w tygodniu, aby zapobiec blokowaniu się urządzenia należy piaskarkę poddać czyszczeniu ultradźwiękowemu.
- (Prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania – rozdział 8.1)

1

Usuwanie resztek proszku czyszczącego


Patrz: Instrukcja użytkowania 7-1 - 7-2

1

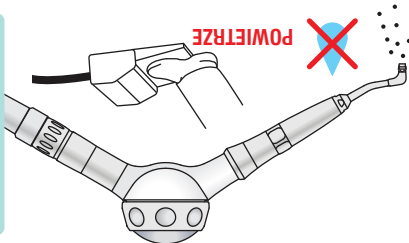


Wysyp proszek samymi tylko powierzem i uruchom bieg jałowy z dyszą wydmuchając resztkę wody i proszek.

2

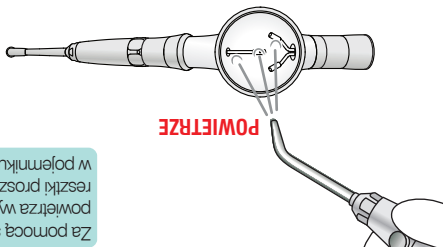


Za pomocą sprężonego powietrza wydmuchaj resztki proszku pozostające w pojemniku na proszek.

3

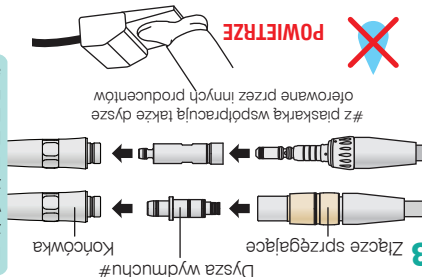

Na złączu sprężającym zamontuj dyszę wydmuchując i podając ją z końcówką roboczą. Następnie uruchom piaskarkę i aby oczyścić przewody popracuj nią na biegu jałowym przez 5 sekund.

4

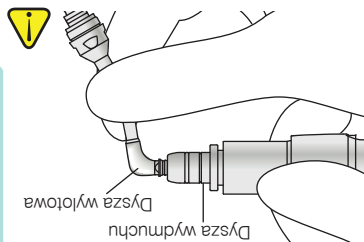


W analogiczny sposób wydmuchaj dyszę wydmuchując i podając ją z końcówką roboczą. Podczas pracy na biegu jałowym, należy pewnie i mocno trzymać wszystkie elementy piaskarki.

2

Czyszczenie


Patrz: Instrukcja użytkowania 7-3 - 7-4

1

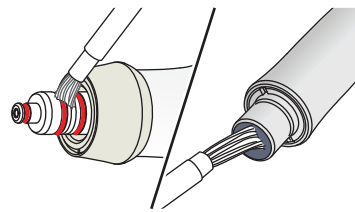

Szczoteczką dotknij ostrożnie oczyścić złącze końcówki i uszczelkę pierścieniową "o-ring".


3

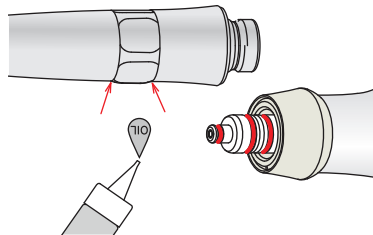

Osuszyć uszczelki pierścieniowe "o-ring" w złączu końcówki roboczej. Kapnąć kroplę oleju a następnie rozproszować ją i wetrzeć wadzić ją i wetrzeć palcami (olej zawarty jest w zestawie).

Brak smarowania sprawi, że po jakimś czasie minimalizuje się możliwość swobodnego obrotu na przegubie pomiędzy końcówką i pojemnikiem na proszek. Złącze może przeciekać.

2

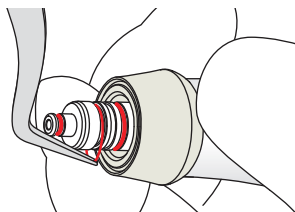

Jeżeli proszek przyswarł do uszczelki "o-ring" to należy je ostrożnie wyjąć, a następnie dokładnie oczyścić uszczelki i rowki na złączu piaskarki.

3

Sterylizacja

Patrz: Instrukcja użytkowania 8-2

135°C


Zdjąć pokrywkę pojemnika na proszek i przemyć ją pod bieżącą wodą. Urządzenie po myciu sterylizuj w autoklawie w temperaturze do 135°C (np. przez 20 minut w temp. 121°C lub 15 minut w temp. 132°C). Wszystkie części piaskarki można sterylizować w autoklawie. #Jeśli temperatura komory sterylizacyjnej podczas cyklu suchego może przekroczyć 135°C, cykl należy pominąć.

Czyszczenie ultradźwiękowe

Patrz: Instrukcja użytkowania 8-1




Pamiętaj! Przed czyszczeniem ultradźwiękowym upewnij się, czy proszek czyszczący został usunięty i urządzenie zostało oczyszczone

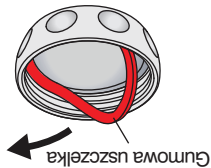

Wyjąć gumową uszczelkę i zdemontować pokrywkę pojemnika na proszek.



Dokładnie przemyć pod bieżącą wodą

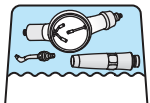

W gorącej wodzie wykonać mycie ultradźwiękowe. Patrz: Instrukcja użytkowania 8-1